

PHILIPS

RESPIRONICS

Dream Wear

CPAPSTORE

Régua de Medida

Instruções:

- 1 Imprima este arquivo Adobe PDF em 100% na sua impressora. Use a verificação de precisão de impressão à direita para garantir a impressão no tamanho adequado.
- 2 Dobre a parte inferior desta página na linha tracejada.
- 3 Corte ao longo da linha pontilhada ao redor do calibrador.
- 4 Coloque o indicador de montagem no seu nariz, como mostrado na figura abaixo.
- 5 Determine o tamanho apropriado em que a borda externa das narinas e a ponta do nariz entrem em contato com o calibrador. (S - pequeno, M - médio, MW - médio largo ou L - grande)

Impressão de Verificação



INDICADOR MONTAGEM

Dica: para o melhor desempenho, use a menor almofada que se adapta ao seu nariz.

