

**Marca superior em desempenho,**  
sem marca na pirâmide nasal

**O design subnasal inovador**

evita as marcas vermelhas na pirâmide nasal e proporciona ao seu paciente o mais amplo campo de visão de todas as máscaras oronasais existentes no mercado\*

**Fácil de utilizar**

com uma estrutura modular adaptável a todos os tamanhos de almofada

**Clips de desencaixe rápido**

para facilitar o encaixe e desencaixe

Almofada pequena	1090692
Almofada média	1090693
Almofada grande	1090694

**Correias em tecido confortável e macio**

Arnês grande	1090696
Arnês normal	1090697

**Desconexão rápida**

Tubo de desencaixe rápido	1090689
---------------------------	---------

Clips do arnês x 2	1090698
--------------------	---------

Máscara com arnês	Internacional <sup>(2)</sup>	Global <sup>(1)</sup>
Pequena	1090662	1090602
Média	1090663	1090603
Grande	1090664	1090604

<b>Medidor da máscara</b>
1090699

\*dados internos em arquivo.

# Sugestões úteis

Seguem-se algumas sugestões a ter em conta aquando da colocação e utilização da máscara Amara View para o tratamento dos distúrbios respiratórios do sono.



Ao contrário da maioria das máscaras oronasais, o tamanho de almofada da Amara View é determinado através da medição da profundidade do nariz utilizando um simples medidor.

Basta colocar o medidor sob o seu nariz **sem pressionar contra a face** e a extremidade nasal indicará se necessita de um tamanho de almofada pequeno, médio ou grande. **Se a medida estiver entre 2 tamanhos, selecione sempre o tamanho mais pequeno.**

## Instruções de colocação



1 Desaperte o arnês rodando os clips para os desencaixar.



5 Pressione os clips do arnês para os encaixar no devido lugar.



2 Selecione um tamanho de almofada que abranja a boca e que assente na base do nariz.



6 Puxe as patilhas do arnês para trás, para ajustar uniformemente as respetivas correias superiores e inferiores.



3 Segurando a máscara contra o rosto, puxe o arnês por cima da cabeça.



7 Ajuste a correia superior de modo a que o arnês assente de forma confortável, sem apertar.



4 Certifique-se de que o nariz fica posicionado por cima (**não no interior**) da abertura da almofada.



8 Ligue a um aparelho de CPAP operacional para efetuar os ajustes finais.

Para obter mais sugestões relativas à colocação, descobrir como deve efetuar um ajuste em caso de fugas ou obter as instruções de limpeza, assista aos nossos guias em vídeo, visite: [www.sleepapnea.com/products/masks/](http://www.sleepapnea.com/products/masks/)

(1) Global: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Holandês, Português do Brasil.

(2) Internacional: Alemão, Árabe, Búlgaro, Cazaque, Checo, Croata, Dinamarquês, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Estónio, Finlandês, Francês, Grego, Hebreu, Húngaro, Inglês, Italiano, Letão, Lituano, Macedónio, Holandês, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Servo, Sueco, Turco, Ucrainiano.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)  
Broudy CSP 3/9/16 MCI 4107292 PN 1127494

